

## COMPONENTES

---



- 1 – Respaldo
- 2 – Freno de funcionamiento /aparcamiento ajustable
- 3 – Superficie del asiento.
- 4 – Manillas de altura ajustable
- 5 – Ruedas delanteras orientables 200 mm.
- 6 – Bolsa de la compra

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

---

Este andador ha sido diseñado para ser utilizado como asistente de movilidad y proporciona un elemento natural para que el usuario camine de forma segura con su peso asentado entre los manillares y el andador frente a él.



### El usuario debe:

- Leer este manual atentamente antes de utilizar el andador
- Comprobar siempre que los frenos estén en posición de bloqueo cuando el andador no está siendo utilizado.
- Comprobar que todas las ruedas estén bien fijadas antes del uso
- Comprobar que los frenos funcionan correctamente
- Comprobar que el ajuste de altura del manillar es el correcto antes de utilizar el andador
- Comprobar que el andador está totalmente desplegado
- Tener cuidado al transportar el andador plegado. Mantener las manos alejadas del mecanismo de plegado para evitar pellizcos.



### El usuario no debe:

- Utilizar el andador como medio para transportar personas; no está diseñado como silla de ruedas
- Sentarse en el andador si los frenos no están en posición de bloqueo; ello podría provocar daños al usuario o a otras personas como resultado del movimiento imprevisto del andador
- 'Sentarse bruscamente' en el asiento del andador. Debe sentarse siempre en el andador de una manera suave y controlada. Solicitar ayuda si es necesario
- Colgar objetos en las palancas de freno o empuñaduras. Ello podría afectar al funcionamiento de los frenos y/o a la estabilidad del andador

Se han tomado todas las medidas para que su andador le proporcione un servicio seguro y fiable siempre y cuando se respeten las recomendaciones indicadas más arriba.


## MONTAJE

---

Retirar el embalaje. El andador estará plegado tal como se indica más abajo. Desplegar en primer lugar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de apriete tal como se indica en la imagen.



Desplegar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de apriete.

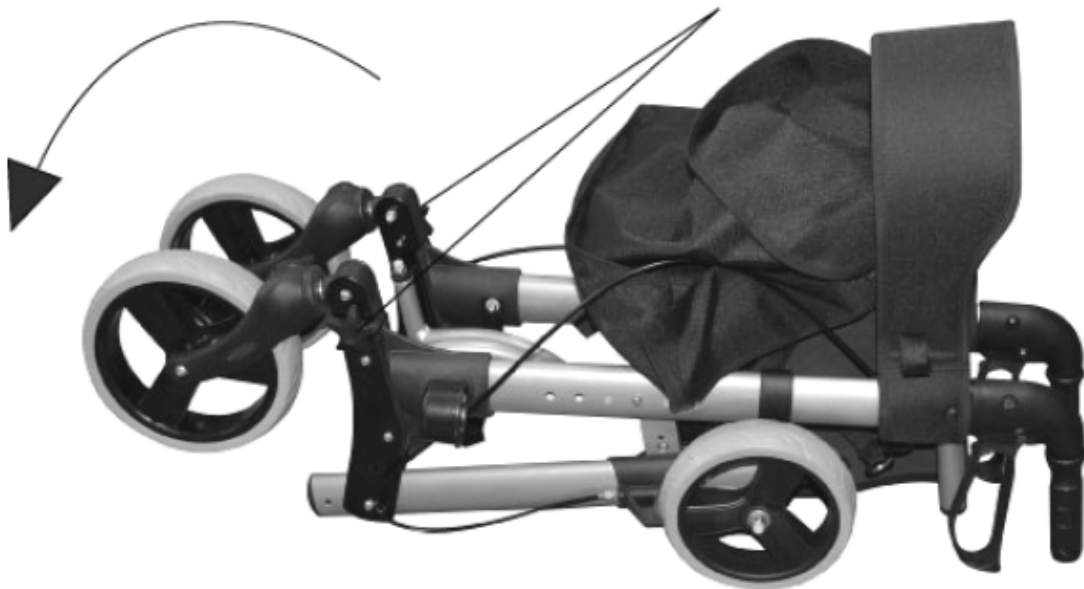


Comprobar que la rosca del mando de apriete penetra en el orificio de la rueda y que la rosca se introduce en el perno en el interior del bastidor.

Continuación:

---

Desplegar las patas traseras tal como se indica en la imagen y fijarlas con los mandos de apriete. Comprobar siempre que el mando de apriete encaje en el orificio de la pata y en la tuerca del bastidor.

Antes de utilizar el andador, comprobar siempre que estén bien apretados los mandos que sujetan las patas traseras y las ruedas.

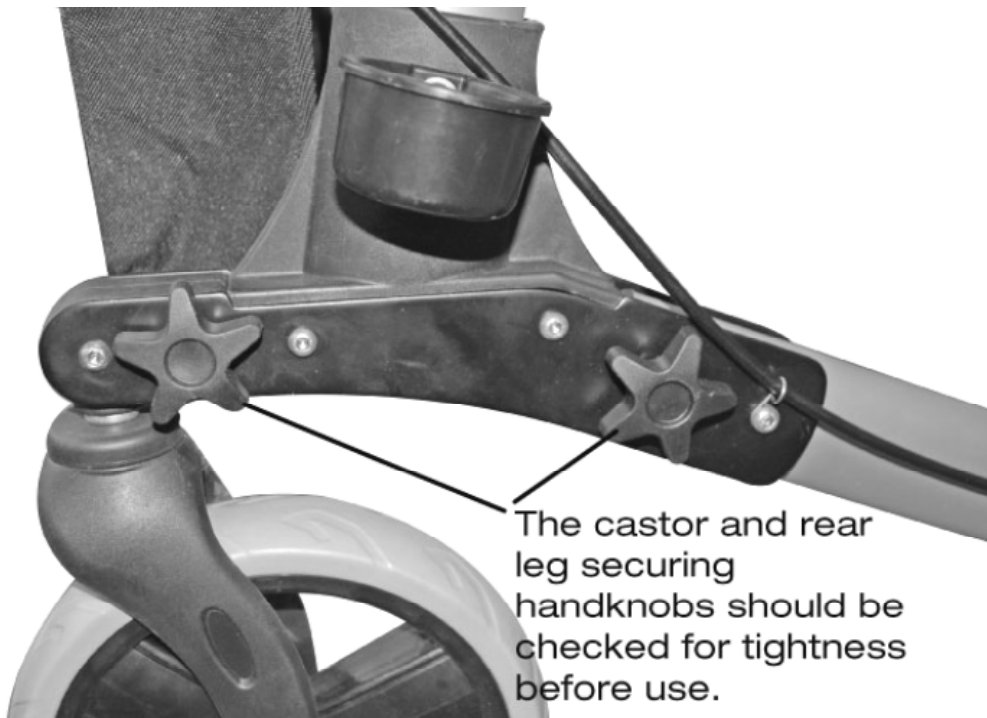


## APERTURA Y PLEGADO


---

Para abrir el andador apretar cualquier lado de las barras tal como se indica más abajo. Deberá sentir que ambos lados se colocan correctamente con un 'clic'.

*Apretar aquí*

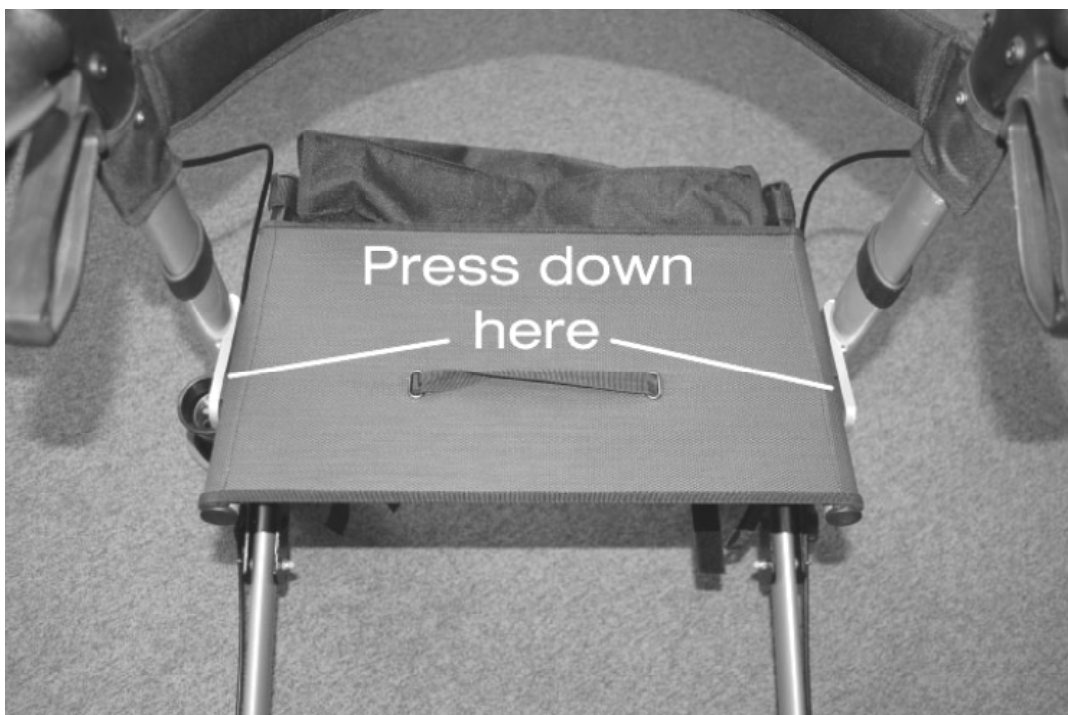

Para plegar el andador tirar suavemente de la correa en medio del asiento como se indica más abajo.

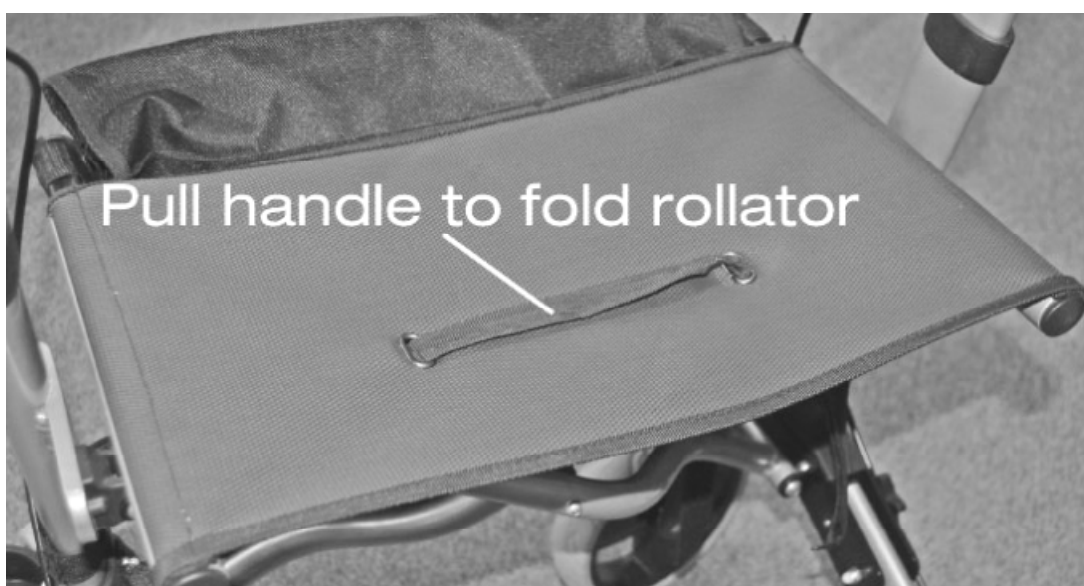

*Tirar de la correa para plegar el andador*

## AJUSTE DEL MANILLAR

---

Se puede ajustar la altura de los manillares del andador para que se adapte a diferentes usuarios. Apretar simplemente el botón de resorte y ajustar a la altura deseada. Repetir la operación en el otro lado y asegurarse de que ambos manillares están bien fijados y colocados a la misma altura antes del uso.

El botón de resorte debe estar colocado en la misma posición en ambos lados.



## FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE LOS FRENOS

---


- 1 – Levantar la palanca de freno para detener el andador.
- 2 – Apretar la palanca de freno para bloquear las ruedas traseras, levantar la palanca de freno para quitar el bloqueo.

Los frenos deben estar en posición de bloqueo cuando se va a utilizar el asiento; comprobar el bloqueo empujando hacia delante el andador.

Continuación:

---

El ajuste de los frenos se realiza de la siguiente manera:

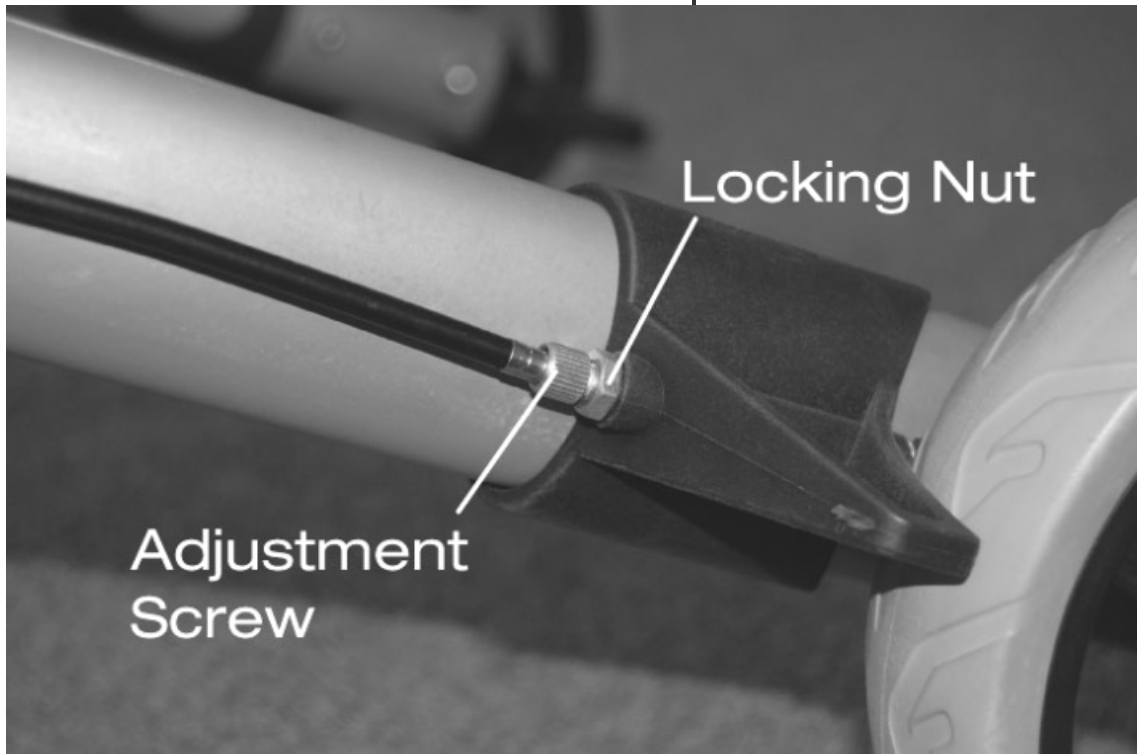

- Tuerca de bloqueo
- Tornillo de ajuste

Girar hacia la izquierda el tornillo de ajuste para aumentar la tensión de frenado y bloquear el ajuste girando la tuerca de bloqueo hacia la derecha manteniendo inmóvil el tornillo de ajuste.

***Cuando el freno está en posición de bloqueo, reducir el ajuste del freno para permitir una ligera presión de frenado puede resultar ineficaz.***

## **MANTENIMIENTO**

---

Con el tiempo los cables del freno pueden alargarse; en ese caso, habrá que reemplazarlos. Acuda a su proveedor habitual.

Cada vez que se utilice el andador hay que comprobar que las ruedas están bien fijadas. Comprobar también que los frenos funcionan correctamente y que los manillares y mandos manuales están bien sujetos.

Si cualquier pieza del andador parece suelta o poco segura, deje de utilizar el andador hasta que sea examinado por un profesional autorizado.

## LIMPIEZA

---

El andador puede limpiarse con un paño húmedo o esponja y agua caliente con jabón. Si fuera necesario se puede utilizar un limpiador doméstico bactericida.

Hay que vigilar que no queden restos de la limpieza en las manillas o en el asiento (cuando esté montado) ya que podrían resultar resbaladizos al uso. No utilizar estropajos ni utensilios abrasivos ya que podrían dañar la superficie del andador.