

MANUAL DE USUARIO PARA LOS MODELOS DE ANDORES

KY9144L	KY9146L	KY9144L-A	KY9141L
KY9142	KY9143	KY9145L	KY9144L(S)
KY9149L	KY9144L-B	KY9148L	

Introducción:

Andador rollator

1. Con cesta o bolsa de la compra
2. Ruedas para su mejor desplazamiento
3. La altura de la manecillas son ajustables
4. Asiento
5. Capacidad de plegado para ahorrar espacio
7. Freno: apriete el freno cuando esté parado, suelte el freno para el movimiento



USO DEL ANDADOR

1. Suelte la tuerca, ajuste a las manecillas a la altura apropiada y vuelva a apretar la tuerca. No utilizar hasta asegurarse de que está bien ajustado y apretado
2. Abrir o plegar el marco, abriendo o plegando la varilla de conexión

Tuerca de ajuste de altura



Zona de plegado de andador

MANTENIMIENTO:

REVISE LOS TORNILLOS REGULARMENTE, REVISE EL ESTADO DE LAS RUEDAS PERIODICAMENTE. REEMPLAZAR LAS PIEZAS POR UNA NUEVA TAN PRONTO OBSERVE SIGNOS DE DESGASTE.

DEBE LIMPIARSE CON REGULARIDAD Y SER DESINFECTADO PARA UNA MAYOR HIGIENE



Guarde las instrucciones ya que podrían serle de utilidad más adelante



GARANTÍA:

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido



Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co., Ltd.
Yanfeng Industrial Area, Dali, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong, P.C.R.



Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU



Importador y Distribuidor / Imported and Distributed
Sunale Canarias S.L.
C/ Tenderete s/n. Edif Multiuso.
San Cristobal de La Laguna. CP:38108