

# MANUAL DE USUARIO

## Elevador de Baño



### Instrucciones de ensamblaje:

1. Levante el asiento y la tapa del inodoro, o remueva ambos
2. Si desea utilizar las agarraderas, instale como se indicó arriba.
3. Tense el pomo de ajuste en contra de las manecillas del reloj hasta que la paleta quede suficientemente alejada del borde interno de la tasa. Ajuste solo con los dedos ya que el uso de herramientas podría dañar el pomo de ajuste
4. Coloque las aletas trasera del asiento del inodoro debajo del borde del inodoro y coloque el asiento en el centro de la tasa
5. Gire el pomo de ajuste en favor de las manecillas del reloj para tensar
6. Para remover el asiento elevado, gire el pomo de ajuste en contra de las manecillas del reloj y tire del asiento hacia arriba y hacia usted

Equipamiento de series	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reposabrazos abatibles y desmontables</li><li>• Ángulo de inclinación ajustable</li></ul>
Profundidad de asiento	40 cm
Altura de asiento ajustable	8   10   12 cm (más altura inodoro)
Apertura interior higiénica	29 x 22,4 cm ovalda
Anchura total	56 cm
Altura total	36 cm
Profundidad total	49 cm
Peso total	6,8 kg
Capacidad de carga	150 kg
Color	blanco

### **Instrucciones para el usuario:**

1. El asiento elevado para inodoros se utiliza igual que un asiento de inodoro normal
2. Si no desea utilizar las agarraderas removibles, se recomienda el uso de barandillas o agarraderas de seguridad

### **Seguridad:**

1. Verifique regularmente que el asiento esté bien colocado antes de utilizarlo. El peso del usuario debe estar distribuido completamente al centro del asiento, no hacia el frente o hacia un lado, ya que el producto podría volcarse.
2. Siempre asegúrese de que el asiento elevado esté firme a la tasa
3. El asiento elevado no está hecho para ser instalado permanentemente. Se debe aflojar los pomos de ajuste, reajustar la posición del asiento y volver a tensar los pomos de ajuste con regularidad
- 4 El peso máximo del usuario no debe ser mayor de 140 kg

### **Limpieza:**

Este asiento elevado para inodoros se puede limpiar fácilmente con productos de limpieza del hogar y detergentes no abrasivos



### GARANTÍA:

**La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido**



Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co., Ltd.  
Yanfeng Industrial Area, Dali, Nanhai District,  
Foshan City, Guangdong, P.C.R.



**Wellkang Ltd**  
Suite B, 29 Harley Street  
LONDON, W1G 9QR, U.K.  
[www.CE-Marking.EU](http://www.CE-Marking.EU)



Importador y Distribuidor / Imported and Distributed  
Sunale Canarias S.L.  
C/ Tenderete s/n. Edf Multiuso.  
San Cristobal de La Laguna. CP:38108